

환자용 계단운반기

**LIFTKAR<sup>®</sup>** PTR

리프트카 PTR



**SANO**  
사노

사노라면  
더 좋은날도  
옵니다

# 리프트카 PTR

휠체어 계단운반기 (최고160kg)

승객과 보호자 모두 더 안전하고 편안하게

**리프트카 PTR**은 휠체어 사용자를 계단으로 편리하고 안전하게 모시는 것을 돕는 무한궤도형 전동 리프트입니다.

**리프트카 PTR**은 직선형 계단 전용으로 개발된 휴대용 전동 운반기입니다.

(나선형 계단은 **리프트카 PT**)

이제 휠체어 사용자는 더 자유로운 활동이 가능하며 보호자가 더는 계단에서 고생할 필요가 없습니다.



일반 휠체어  
(표준형) 뒤로



PTR  
진입,



끝까지  
넣고



휠체어와  
결합하면





평지에서도



계단에서도  
이동 가능



## 제 원

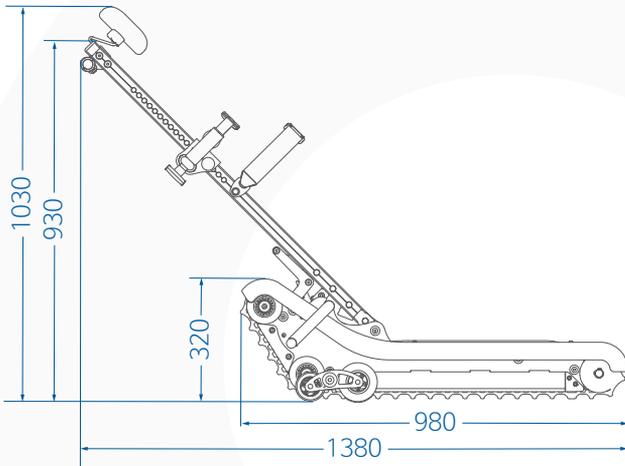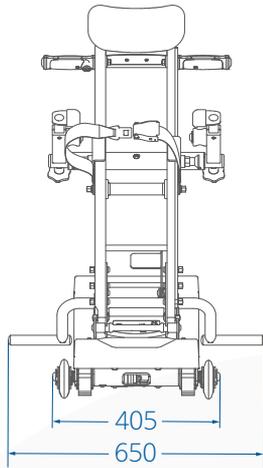

\* 휠체어 무게 포함

	PTR 130	PTR 160
허용하중 *	130kg	160kg
전 폭	650mm	
전 장	1380mm	
전 고	1030mm	
자체 무게	총 38.2kg (구동부 28.6kg + 손잡이부 9.6kg)	
상승 속도	1단: 5.5 M/ 분 2단: 6.5 M/ 분 3단: 7.5 M/ 분	
계단 경사각	최고 35°	
완충 시 사용 계단	6시간 완충 시 1000 계단	
배터리	24V 12Ah (납산)	
최소 공간	970 x 970mm	
품 번	C-1340	C-1341
	※ 허용하중을 제외한 모든 규격은 같음	

**리프트카 PTR**은 배터리가 내장된 구동부와 손잡이부로 구성되어 있으며 쉽게 구동부와 손잡이부의 분리, 결합이 가능하여 차량 등에 실을 수 있습니다.

**리프트카 PTR**은 계단에서의 환자 이송 작업에 놀라운 안전성을 보증합니다.



구동부



손잡이부



조절 가능한 휠체어 조임쇠

# 특징

## 독보적인 10가지 장점

- 경사각에 따른 속도 조절  
계단 각도가 35도에 이르면 속도가 느려집니다.
- 너무 가파르면 경고  
계단 각도가 35도를 초과하면 빨간불과 함께 경고음이 울리며 멈춥니다.
- 상하강 구별 표시등  
녹색불(상승), 녹색불 깜빡임(하강)
- 초과 하중 경고 회로  
허용하중이 넘으면 빨간불이 켜집니다.
- 뛰어난 효율성: 최대 1,000계단 상승
- 관계자 외 사용방지 열쇠
- 비상 정지 버튼
- 초소형컴퓨터 컨트롤 시스템
- 통합 진단 시스템
- 작동시간 기록 기능



## 기본 장착


	
<p><b>안전벨트</b></p> <p>C-1480</p>	<p><b>충전케이블</b></p> <p>C-1481</p>

## 추가 옵션

내게 마침맞은 부속으로 더 편안하고 안전하게

 <p><b>등 쿠션</b> 등받이 높이 조절 가능</p> <p>C-1483</p>	 <p><b>머리받침</b> 앞은키 75cm 미만 불필요</p> <p>C-1482</p>	 <p><b>미니램프</b> 휠체어 휠을 받쳐주어 더욱 안전</p> <p>C-1487(690mm) C-1488(720mm)</p>	 <p><b>램프</b> 작은 휠의 휠체어(뇌변병용)에 적용</p> <p>C-1484</p>
--	---	---	---

## 램프 활용 예시

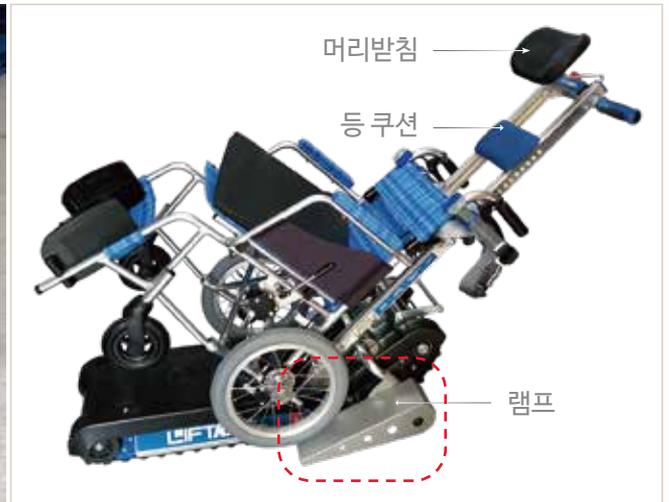

일반 휠체어 휠을 받쳐주는 미니램프  
C-1487 장착 시 전폭 690mm  
C-1488 장착 시 전폭 720mm





활용 동영상

휠이 작은 뇌변병용 휠체어에 필요한 램프 C-1484

## 리프트카 PTR 적용 가능 여부 점검

### 계단유형

90도로 꺾이는 직선형 계단만 적용 가능

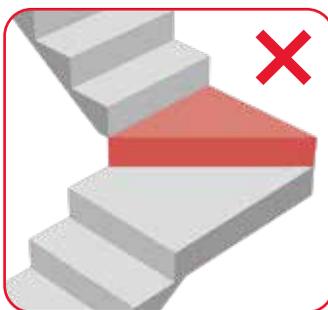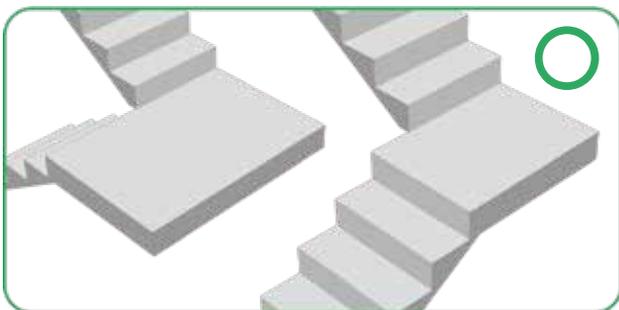

삼각형, 나선형 계단에 적용 불가

삼각형, 나선형 계단에 적용 가능한 **리프트카 PT**



### 계단참 공간

105cm 이상 회전반경 확보 여부



100cm도 가능하나 숙련도가 요구됩니다.

▶ 내 계단에서 사용 가능 여부 체크 포인트 영상(3분) [ya.ly/1Z](http://ya.ly/1Z)



### 계단 경사각

최대 35도까지 가능



[sano.kr/35](http://sano.kr/35)  
스마트폰으로 계단 각도를 손쉽게 확인하세요. (줄자 필요)

### 휠체어

표준 휠체어(병원용)가 가장 적합합니다.



틸팅, 활동형, 맞춤형 특수 휠체어는 적용이 어렵거나 불가하므로, 별도의 표준 휠체어가 필요할 수 있습니다.



리프트카 피티알 **LIFTKAR PTR**

환자용  
for PEOPLE

MAX  
160kg

ya.ly/1J



리프트카 피티 **LIFTKAR PT**

환자용  
for PEOPLE

MAX  
160kg

ya.ly/1K



# SANO



리프트카 에스에이엘 **LIFTKAR SAL**

화물용  
for LOAD

MAX  
170kg

ya.ly/1L



리프트카 에이치디 **LIFTKAR HD**

화물용  
for LOAD

MAX  
330kg

ya.ly/1M



**SANO**  
사노  
사노라면  
더 좋은날도  
입니다

### 제조원

SANO Transportgeraete GmbH  
Gewerbezeile 15,  
4040 Lichtenberg/ Linz  
Austria (유럽 오스트리아)

Tel. +43 (0) 7239/510 10  
Fax. +43 (0) 7239/510 10-14  
office@sano.at

www.sano.at

### 수입원

강남캐스터넷  
서울시 금천구 시흥대로 97  
시흥유통상가 24동 203호  
대한민국

전화 02-805-3135  
팩스 02-894-3136  
메일 38@8876.kr

www.sano.kr  
www.8876.kr



식약처 의료기기 1등급 / 수입업 허가번호: 제 3768호 / 수입신고번호: 수신 16-237호 / 품목명: 전동식 환자리프트 / 모델명: LIFTKAR-PTR

제품의 디자인 및 성능은 예고 없이 변경될 수 있음 / 국제특허 / 리프트카PTR / 2025-03 인쇄